

Ilonion Care Oy

HMT-1 PIKAOHJEET

- ▶ Paina HMT-1 laite päälle ja aseta kiristysremmit itsellesi sopivaksi. Sääda minimonitori niin, että se ei tule oman näkökentän eikä monitorin näytön tielle.
- ▶ Mene "my camera" -äänikomennolla kuvatilaan. Arvioidulle leikkausalueelle asetetaan etusormi, jonka pitäisi näkyä mahdollisimman keskellä näyttöä.
- ▶ Zoomaus toimii komennolla "zoom level ja haluamasi zoomaus taso 1-5 englanniksi" (esim "zoom level five")
- ▶ Kuvan saat otettua komennolla "take photo"
- ▶ Videon saat aloitettua "start video", ja videon saat päätettyä komennolla "stop recording". Zoomausta ei pysty muuttamaan kesken videoinnin. Lopeta videointi, zoomaa sitten haluaasi kohtaan, ja aloita videointi uudelleen.
- ▶ Komennolla "navigate back" pääset aina edelliseen valikkoon. Komennolla "navigate home" pääset alkuvalikkoon, joka on päällä laitteen käynnistyessä.

Tarkemmat ohjeet ja toiminnot ovat isommassa ohjeistuksessa.